

Detta ska uppmärksammas på alla de urinpåsar som har en plastflärp som backventil inuti påsen i anslutning till slangen



Sedvanliga urinpåsar som exempelvis denna som finns på artikelnummer 25442 - Urinpåse ej tömbar sängpåse Unomedical 1,5L slang 110cm, där man tydligt ser den lilla plastflärp som omger slangen i mynningen på påsens insida. Genom synergier har det uppmärksammats att urin inte runnit ned i påsen med urinträngningar som symptom på grund av att denna flärp har vikt sig.

Vill med denna information rikta uppmärksamhet på att kontrollera att denna backventil är korrekt, illustrande bilder följer på hur det ska se ut när det är korrekt samt när det är felaktigt. Om det visar sig att plastflärpen vikt sig kan man försöka att släta ut den eller byta till en ny urinpåse med korrekt plastflärp. Denna bild illustrerar när backventilen i påsen är korrekt (Rätt)



Informationen gäller för urinpåsar avsedda som sängpåse tömbar samt icke tömbar.

Denna bild illustrerar när backventilen har vikit sig (Fel)



Sedan rekommenderas att 28944 – urinpåhängare för säng, plast, blå ALLTID används för att minska risken att backventilen ska täppas till.

