

# VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN OM MIO ADVANCE

Medtronic

Infusionssetet MiniMed™ Mio Advance (MMT-242, MMT-242T, MMT-247, MMT-247T)  
Uppdatering av användarhandboken - Insulinpåfyllningsvolym av mjuk kanyl

Medtronicreferens: FA851

## Bäste Mio Advance-användare,

Vi vill meddela dig att kanylpåfyllningsmängden som rekommenderas för infusionssetet MiniMed™ Mio Advance är felaktigt och ska nu rättas till i användarhandboken. Kanylen är den lilla delen i infusionssetet som sitter direkt under huden.

### Förklaring av problemet:

I den nuvarande användarhandboken av MiniMed™ Mio Advance infusionsset rekommenderas att 6 mm och 9 mm mjuka kanyler fylls med 0,9 enheter (0,009 ml) insulin efter införandet av ett nytt set. Användarhandboken uppdateras nu till att rekommendera en påfyllningsmängd på **0,6 enheter** (0,006 ml) insulin för både 6 mm och 9 mm mjuka kanyler. Att reducera insulinvolymen till 0,6 enheter (0,006 ml) minskar risken för potentiella hypoglykemiska händelser, särskilt hos barn. I förpackningar med den gamla användarhandboken kommer vi att lägga ett informationsblad (Erratum) om den nya rekommendationen.

### Vad du bör göra:

Fyll infusionssetet MiniMed™ Mio™ Advance kanyl med insulin enligt följande:


6 mm: 0,6 enheter (0,006 ml)

9 mm: 0,6 enheter (0,006 ml)

Patientsäkerhet är vår högsta prioritet, och vi är engagerade i att leverera säkra och effektiva terapier för våra användare. Vi tackar dig för din tid och uppmärksamhet till detta viktiga meddelande.

Om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp, vänligen ring vår support på 08-56858520.

Vänliga hälsningar,

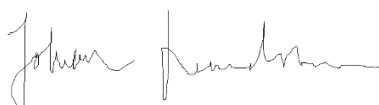

Johan Lundström, Affärsområdeschef, Diabetes