

Tillfälligt förskrivningsstopp på stålyft Minilift 200EE

Minilift200EE har visat sig ha tekniska problem - Om lyftarmen körs upp i översta läget löser klämskyddet ut vilket gör att Miniliften stannar.

På grund av detta har Länservice tagit beslut att tillfälligt stoppa förskrivning av MiniLift 200EE.

Leverantören kommer att åtgärda problemet och förhoppningen är att det ska vara löst före sommaren.



Vad sker med Minilift som finns ute hos brukare?

Förskrivare som vet med sig att du förskrivit MiniLift behöver i nuläget inte göra någonting. I de flesta fall fungerar MiniLift som den ska då det är sällan förekommande att den behöver höjas till högsta läge.

Om läge skulle uppstå att lyftarmen blir stående i högsta läge kan detta avhjälpas genom att med en enkel handtryckning pusha tillbaka lyftarmen initialt när man trycker på nedknappen för att aktivera funktionen. Fenomenet uppträder inte om brukaren samtidigt belastar västen bakåt, då går lyftarmen ned naturligt.

Upplever du att det är problem med användningen, rekommenderar vi att lyften byts ut mot annan modell och att miniliften returneras.

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta

Lena N Hansson

Hjälpmiddelskonsulent, Länservice

lena.nordgren-hansson@norrbottn.se